

109 年 10 月 15 日起新增 大麻尿液篩檢 (THC) 檢驗項目

說明：

- 一、自 109 年 10 月 15 日起新增「大麻尿液篩檢 (THC)」檢驗項目，委託中國醫藥大學附設醫院檢驗醫學部代檢。
- 二、新增項目詳細說明請參考附件。
- 三、若有任何問題，請與檢驗科 **洪曉音** 聯絡，分機：1290。

檢驗表單	藥物血中濃度檢驗單 (CM-T225)
檢驗項目	大麻尿液篩檢 (THM)
參考範圍	<50 ng/mL cutoff
採檢容器及檢體量	 最低採檢量：10 CC 尿液 無菌盒
採檢注意事項	請以無菌痰盒採檢尿液，因該檢驗為法定項目，故請單獨以一個無菌痰盒送檢、勿與其他檢驗項目共用。
檢驗方法	homogenous particle enhanced turbidimetric inhibition immunoassay (PETINIA) technology
可送檢時間	24 小時收檢
報告完成時間	7 個工作天
檢驗組別及聯絡方式	血清組分機：1181
實驗室解釋	<p>1. 大麻為中樞神經迷幻劑，吸食後會產生心跳加快、妄想、幻覺、口乾、眼睛發紅等現象。長期使用會造成記憶、學習及認知能力減退、體重增加、免疫力降低、不孕症、精子減少、精子活動減退及對周遭事務漠不關心之「動機缺乏症候群」。一旦產生依賴性，突然停用會產生厭食、焦慮、不安、躁動、憂鬱、睡眠障礙等戒斷症狀。</p> <p>2. 大麻藥效 2-4 小時，吸食後 1-3 天尿液都會超過 100 ng/mL，吸食二手大麻時，通常數值在 10-40 ng/mL，不會超過 75 ng/mL。目前大麻篩檢標準值是 50 ng/mL。</p>
健保代碼	10813B
給付點數	250
自費收費	
注意事項	因該檢驗為法定項目，故請單獨以一個無菌痰盒送檢、勿與其他檢驗項目共用